

Důležitost správného nasazení respirátoru

Jednorázové respirátory jsou účinné jen tehdy, když je okraj respirátoru na obličeji dobře utěsněn. V okamžiku narušení tohoto utěsnění je narušena také ochrana, protože kontaminovaný vzduch může procházet přes netěsnosti.

Při každém používání částicového respirátoru 3M™ Aura™ řady 9300+Gen3 je nutné při nasazování dodržovat tyto pokyny.



Tvář musí být hladce oholena. Respirátory nesmí být používány se strništěm, vousy či jiným porostem tváře v oblasti obličejové masky, to by totiž bránilo dobrému utěsnění respirátoru na obličeji.



1. Rubovou stranou nahoru a pomocí úchytů oddělte horní a spodní panel.



2. Zatáhnete za úchyty bradového a nosního panelu tak, aby se svorka nosu ohnula a respirátor tak měl tvar žlábků. Zkontrolujte, zda jsou oba panely zcela rozvinuté.



5. Druhou rukou postupně vezměte obě pásky a přetáhněte je přes hlavu.
6. Umístěte horní pásku na temeno a spodní pásku pod uši. Pásky nesmí být překroucené. Upravte pomocí úchytů horní a spodní panel tak, aby bylo uchycení pohodlné. Zkontrolujte, zda nejsou panely složené a že jsou úchyty zcela rozložené.

Nosní svorku vytvarujte podle tvaru nosu a tváří, abyste zajistili řádné utěsnění

Ujistěte se, že jsou oba panely plně rozložené a úchyty rovné.

Respirátor správně umístěte na obličej pomocí úchopu za ventilek nebo nastavením horního a spodního panelu a za pomoci úchytů.



3. Držte respirátor pevně za úchyty a přitom ho mějte otočený otevřenou stranou k obličeji.



7. Oběma rukama vytvarujte nosní svorku dle tvaru nosu tak, aby byla zajištěna dobrá přilnavost a utěsnění. Zmáčknutí nosní svorky jen jednou rukou může mít za následek menší účinnost respirátoru.



4a) Respirátor S VENTILKEM – jednou rukou podržte boky ventilku tak, aby respirátor držel na obličeji.
4b) Respirátor BEZ VENTILKU – držte respirátor ve tvaru žlábků otevřenou stranou směrem k obličeji.



8. Před vstupem na pracoviště je třeba ověřit utěsnění respirátoru na obličeji.

Postup kontroly nasazení

1. Zakryjte přední část respirátoru oběma rukama a dávejte přitom pozor, aby tím nedošlo k narušení jeho utěsnění.
2a) Respirátor BEZ VENTILKU – zprudka VYDECHNĚTE
2b) Respirátor S VENTILKEM – zprudka se NADECHNĚTE.
3. Pokud vzduch uniká okolo nosu, upravte nosní svorku, aby k úniku nedocházelo. Zopakujte kontrolu nasazení.
4. Pokud vzduch uniká u okrajů respirátoru, upravte pásky směrem dozadu po stranách hlavy a zamezte tak netěsnosti. Zopakujte kontrolu správného nasazení.

Pokud se vám správné nasazení NEPODARÍ, do nebezpečné oblasti NEVSTUPOUJTE. Obráťte se na nadřízeného.